




1. RENGØRING

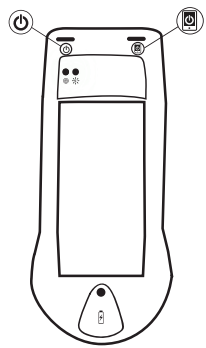


a. Sørg for, at i:X er slukket eller sluk for enheden og for displayskærmen.

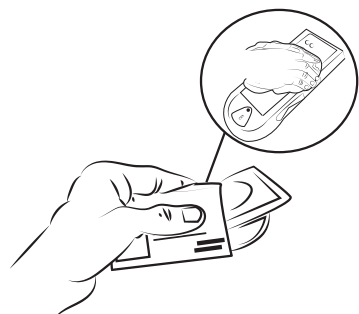


b. Brug en desinfektionsserviet til at rengøre i:X på forhånd.

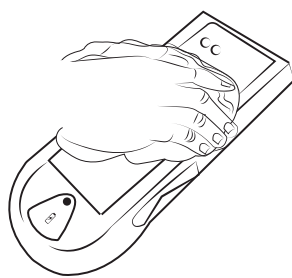

c. Brug en anden desinfektionsserviet til at rengøre hele enheden, inklusive alle sprækker.

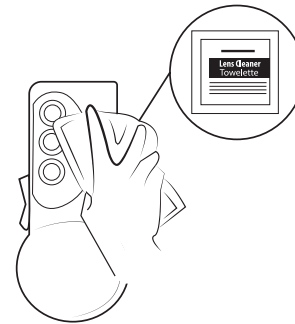

d. Brug linseservietter til at rengøre alle glasoverflader.

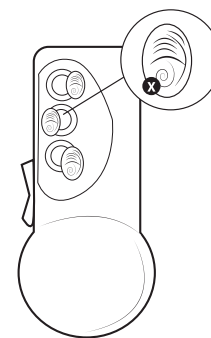


e. Kontrollér, at alle vinduer er rene, fri for alt snavs og fingeraftryk.


2. OPLADNING




a. Oplad enhed og displayskærm med MolecuLight-strømkablet.

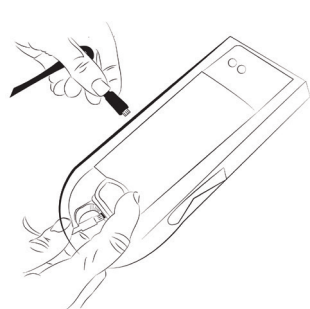


b. Den ene ende af strømkablet forbinder til enheden og den anden til displayskærmen.

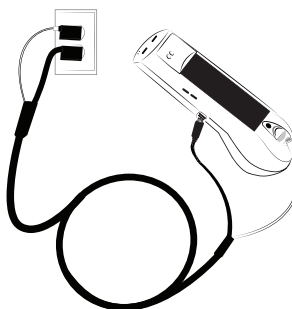

c. Begge opladningsender skal sættes i stikkontakten.

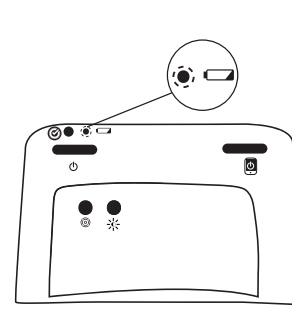


d. Lyddioden blinker, når enheden oplades.

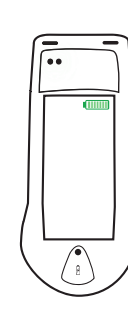


e. Batterikonet vil blive synligt, når displayskærmen oplades.


3. TÆNDING

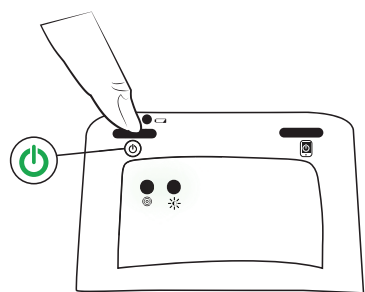


a. Tryk på tænd/sluk-knappen (3 sek.) for at tænde enheden.

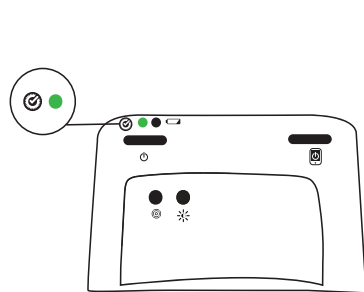


b. Kontrollér, at systemstatusdioden lyser grønt (hvis gul eller rød, se brugsanvisningen).

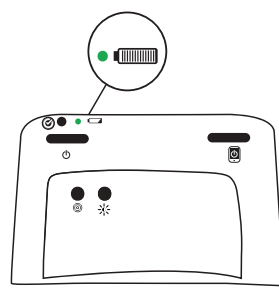

c. Kontrollér batteristatus på enheden (grøn indikerer maksimal opladningskapacitet),

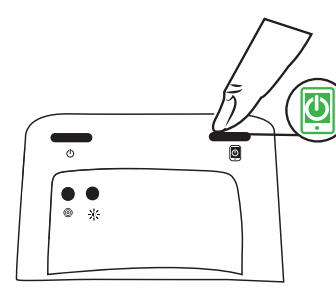


d. Tryk på skærmens tænd/sluk.knap (3 sek.) for at tænde displayskærmen.

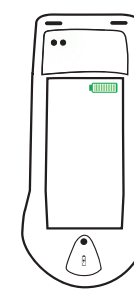


e. Kontrollér displayskærmens batterikapacitet.


4. TAGNING AF ET STANDARDLYSBILLEDE/-VIDEO

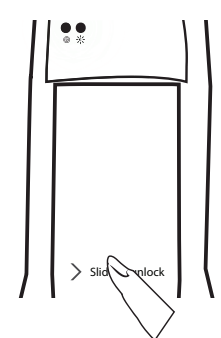


a. Tryk på startknappen, og vælg skyderen.

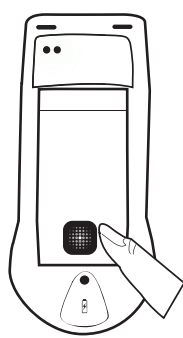


b. Vælg iX Camera-appen på displayskærmen.

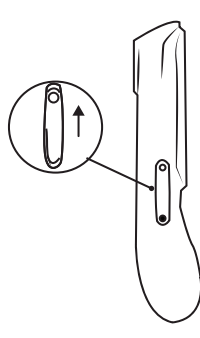


c. Stil vippekontakten i op-position.

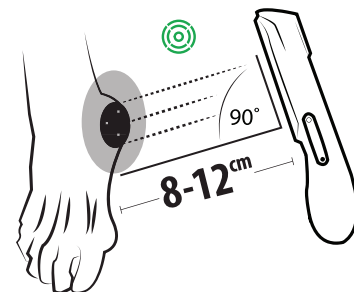

d. Brug afstandsmålersensorens lysdiode til at nå passende afstand (lysdiode lyser grønt).

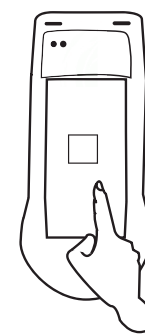


e. Tryk på skærmen for at forbedre fokus efter behov.

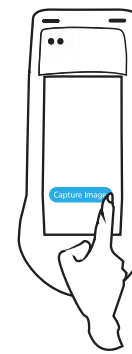


f. Tag billede og/eller video; afstandsmålersensorens lysdiode skal forblive grøn.


5. TAGNING AF ET FLUORESCENCELYSBILLEDE/-VIDEO

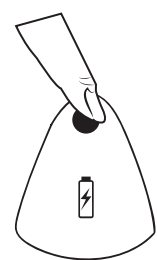


a. Brug startknappen til at få adgang til skærmen, vælg skyderen hvis nødvendigt.

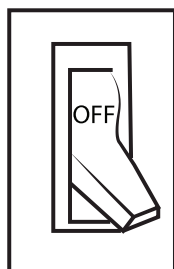


b. Sluk for rumlysene.

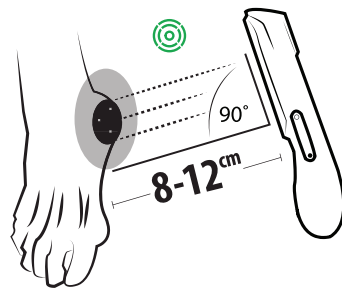


c. Brug afstandsmålersensorens lysdiode til at nå passende afstand (lysdiode lyser grønt).

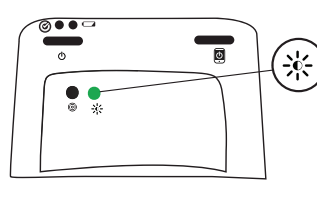


d. Bekræft, at den omgivende lysensors lysdiode er grøn, inden du skifter vippekontakten til FL-Mode.

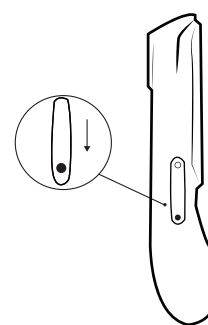

e. Skift til FL-tilstand; den omgivende lysensors lysdiode slukkes, når FL-tilstand aktiveres.


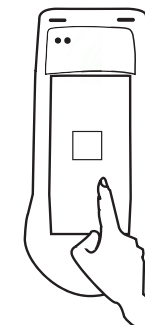


f. Tryk på skærmen for at forbedre fokus hvis det kræves.

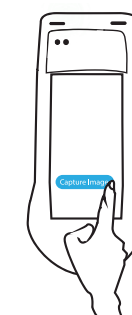


g. Tag billede og/eller video; afstandsmålersensorens lysdiode skal forblive grøn.

6. SLUKNING

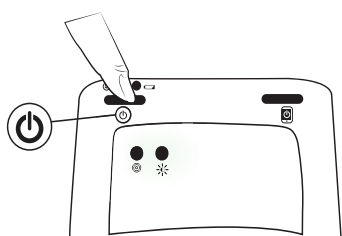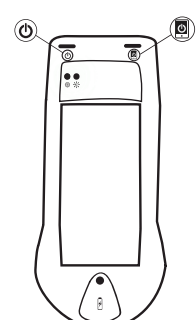

a. Sluk enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.

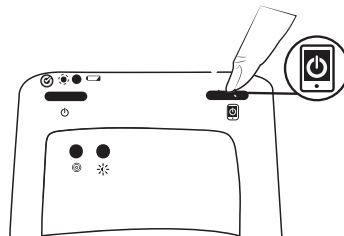

b. Sluk displayskærmen ved at trykke på skærmens tænd/sluk-knap i 3 sekunder.



MolecuLight