




1. PULIZIA

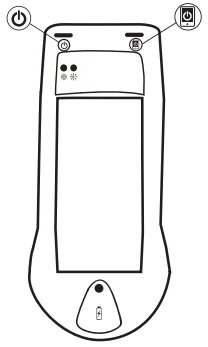


a. Accertarsi che *i:X* sia spento oppure spegnere display e dispositivo.

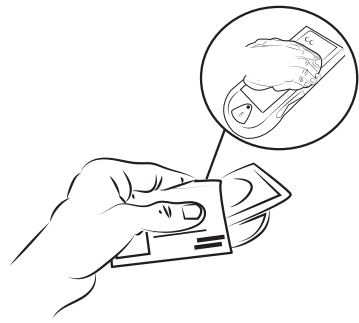


b. Usare una salvietta disinfettante per eseguire una pulizia preliminare di *i:X*.

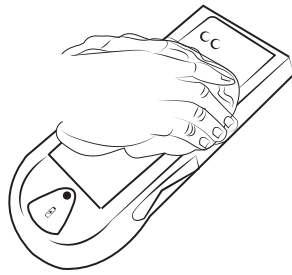

c. Usare una seconda salvietta disinfettante per pulire l'intero dispositivo, fessure comprese.

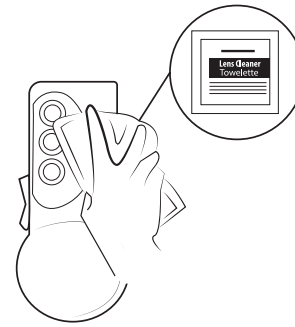

d. Usare una salvietta per lenti per pulire tutte le superfici in vetro.

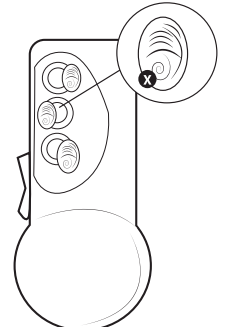

e. Controllare che tutte le finestre siano pulite e prive di impronte e residui di ogni tipo.


2. RICARICA




a. Caricare dispositivo e display usando il cavo di alimentazione MolecuLight.




b. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al dispositivo e l'altra al display.

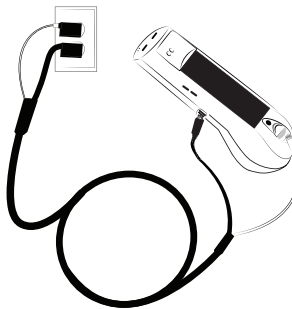

c. Collegare entrambe le diramazioni del cavo a una presa a muro.

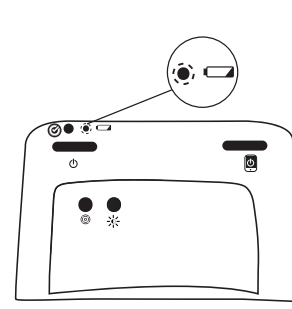


d. Il LED lampeggia mentre il dispositivo è sotto carica.

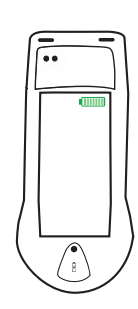


e. L'icona della batteria è visibile mentre il display è sotto carica.


3. ACCENSIONE

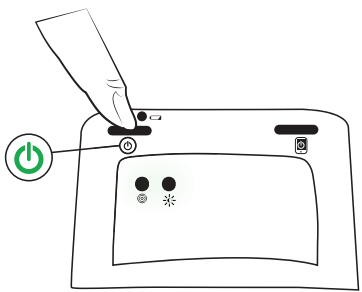


a. Premere il pulsante di accensione (3 sec) per accendere il dispositivo.

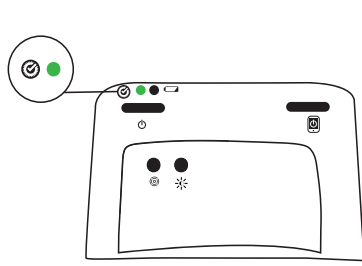


b. Controllare che il LED di stato del sistema sia verde (se giallo o rosso, consultare il Manuale per l'utente).

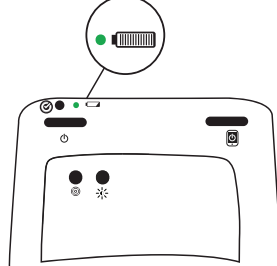

c. Verificare lo stato della batteria sul dispositivo (il verde indica il livello massimo di carica).

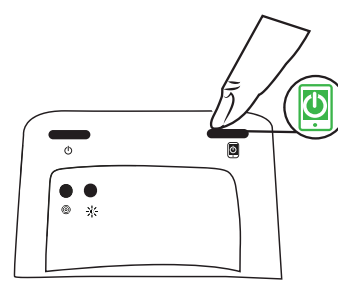


d. Premere il pulsante di accensione del display (3 sec) per accendere il display.

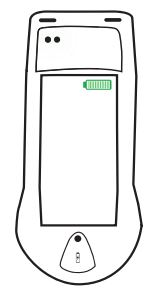


e. Verificare l'autonomia della batteria del display.


4. ACQUISIZIONE DI UN'IMMAGINE/VIDEO STANDARD

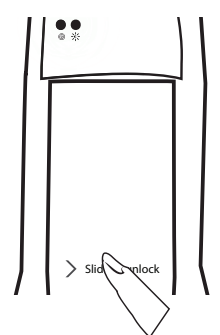


a. Premere il pulsante Home e fare scorrere il cursore verso destra.

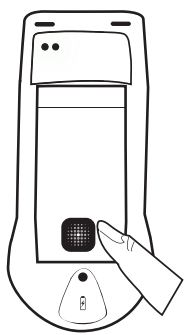

b. Selezionare l'app *iX* Camera sul display.

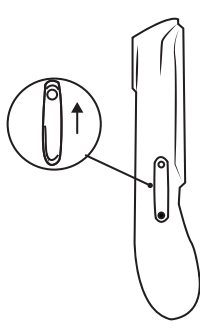


c. Portare l'interruttore basculante nella posizione "sollevata".

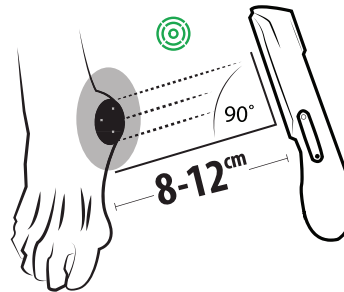

d. Utilizzare il LED del sensore telemetrico per individuare la distanza appropriata (il LED diventa verde).




e. Toccare lo schermo per migliorare la messa a fuoco secondo necessità.

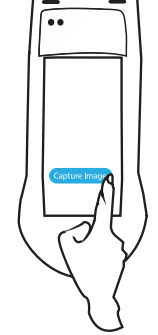


f. Acquisire l'immagine e/o il video; il LED del sensore telemetrico deve rimanere verde.


5. ACQUISIZIONE DI UN'IMMAGINE/VIDEO IN FLUORESCENZA

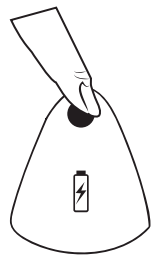


a. Usare il pulsante Home per accedere al display, quindi fare scorrere il cursore se necessario.

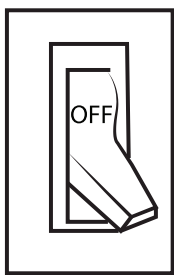


b. Spegnerle luci nella stanza.

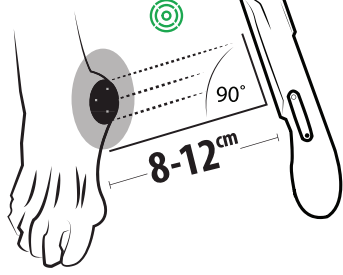


c. Utilizzare il LED del sensore telemetrico per individuare la distanza appropriata (il LED diventa verde).

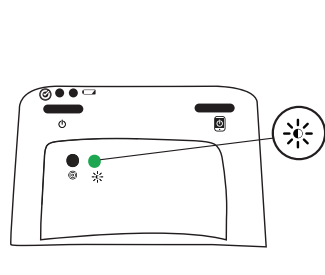


d. Verificare che il LED del sensore della luce ambiente sia verde prima di predisporre l'interruttore basculante in modalità FL.

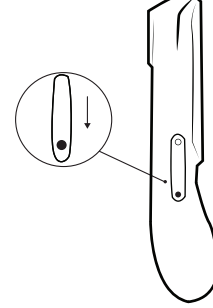

e. Selezionare la modalità FL; il LED del sensore della luce ambiente si disattiva quando si seleziona la modalità FL.


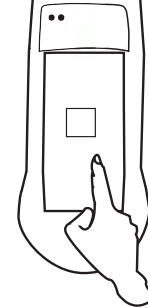


f. Toccare lo schermo per ottimizzare la messa a fuoco, se necessario.

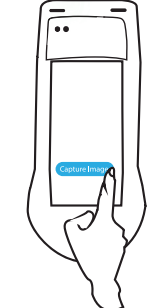


g. Acquisire l'immagine e/o il video; il LED del sensore telemetrico deve rimanere verde.

6. SPEGNIMENTO

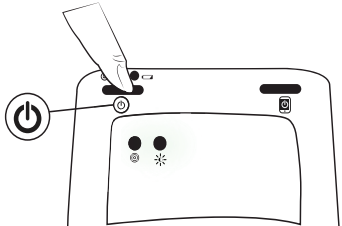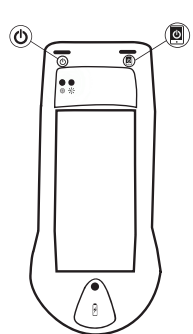

a. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

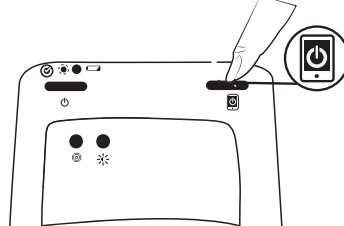

b. Spegnerle il display premendo il pulsante di accensione del display per 3 secondi.



MolecuLight