




## 1. RENGJØRING

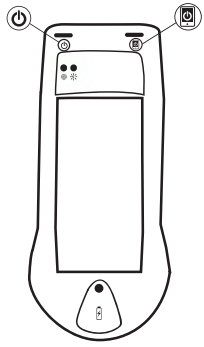


a. Sørg for at i:X er AV eller slå enheten AV og skjermen AV.

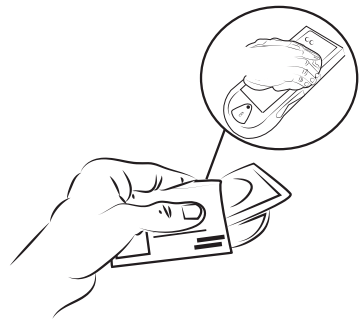


b. Bruk en desinfiserende våtserviett til å forhåndsrengjøre i:X.

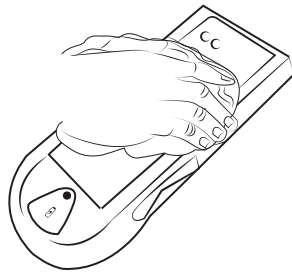

c. Bruk en ny, desinfiserende våtserviett for å rengjøre hele enheten, også i alle sprekker.

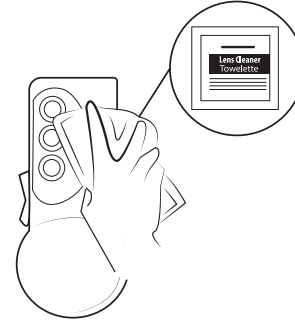

d. Bruk objektivvåtservietttil rengjøring av alle glassoverflater.

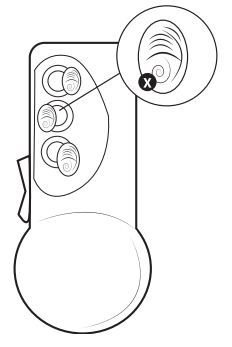


e. Kontroller at alle vinduer er rene og frie for smuss og fingeravtrykk.


## 2. LADING




a. Lad enheten og skjermen med MolecuLight-strømledningen.

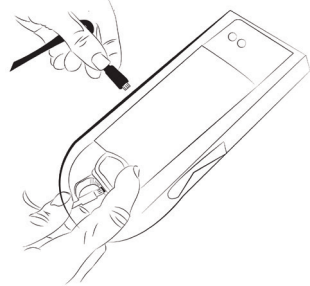


b. Én ende av strømledningen kobles til enheten, og den andre koblet til skjermen.

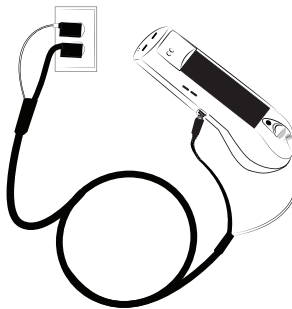

c. Begge ladeender skal være koblet til en veggkontakt.

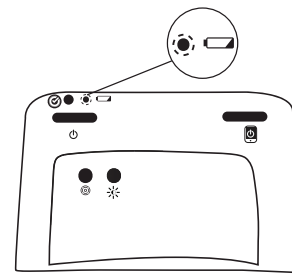


d. LED-lampen blinker når enheten lades.

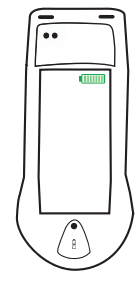


e. Batteriikonet vises når skjermen lades.


## 3. SLÅ PÅ

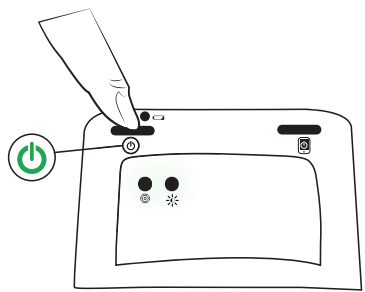


a. Trykk på av/på-knappen (3 sek) for å slå på enheten.

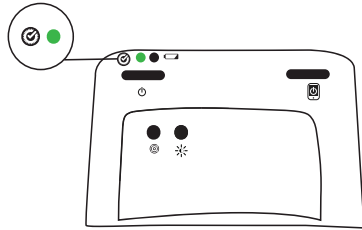


b. Kontroller at LED-lampen for systemstatus er grønn (hvis den er rød eller gul, sjekker du brukerhåndboken).

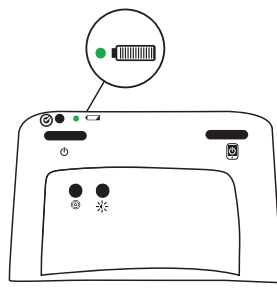

c. Kontroller batteristatusen på enheten (grønn indikerer maksimal ladekapasitet).

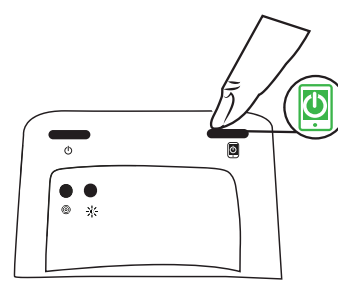


d. Trykk på skjermens av/på-knapp (3 sek) for å slå på skjermen.

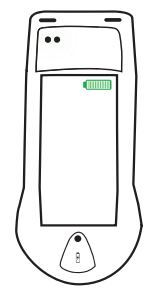


e. Kontroller batterikapasiteten til skjermen.


## 4. TA ET BILDE/VIDEO MED STANDARD LYS

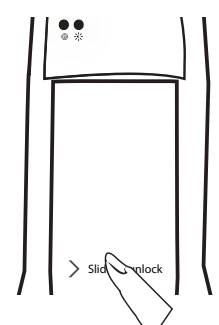


a. Trykk på Hjem-knappen og velg glidebryter.

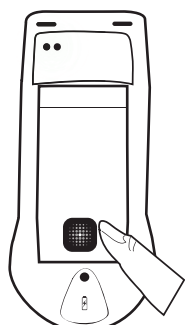


b. Velg iX Camera-appen på skjermen.

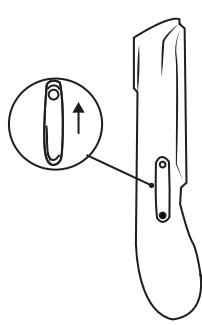


c. Plasser vippebryteren i opp-posisjon.

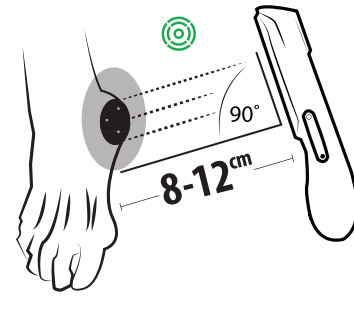

d. Bruk sensor-LED-lampe for rekkeviddemåler for å nå den riktige avstanden (LED-lampen blir grønn).

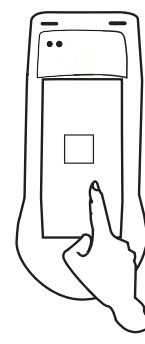


e. Trykk på skjermen for å forbedre fokuset etter behov.

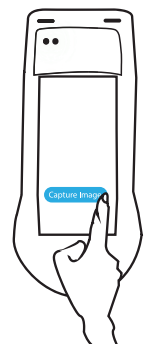


f. Ta bilde og/eller video, sensor-LED-lampe for rekkeviddemåler skal være grønn.


## 5. TA BILDE/VIDEO MED FLUORESCERENDE LYS

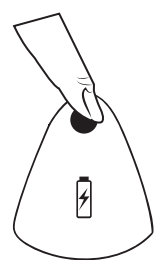


a. Bruk Hjem-knappen til å få tilgang til skjermen, velg glidebryteren ved behov.

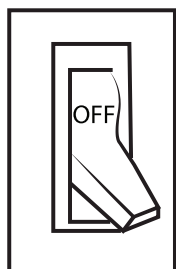


b. Slå av lyset i rommet.

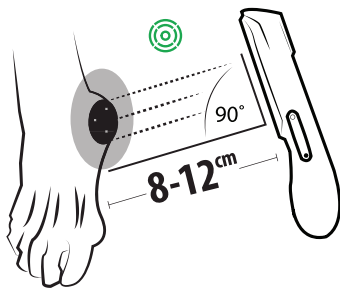


c. Bruk sensor-LED-lampe for rekkeviddemåler for å nå den riktige avstanden (LED-lampen blir grønn).

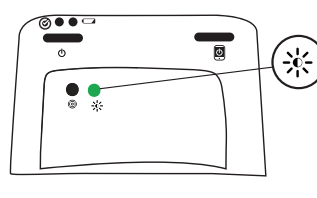


d. Bekreft at sensor-LED-lampen for omsluttende lys er grønn før vippebryteren settes til FL-Mode.

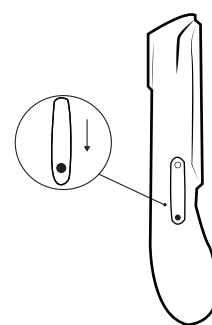

e. Bytt til FL-Mode; sensor-LED-lampe for omsluttende lys slås av når FL-Mode er aktivert.


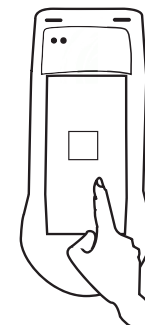


f. Trykk på skjermen for å forbedre fokuset ved behov.

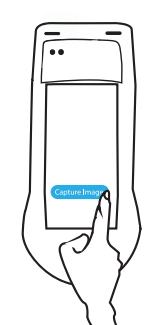


g. Ta bilde og/eller video, sensor-LED-lampe for rekkeviddemåler skal være grønn.

## 6. SLÅ AV

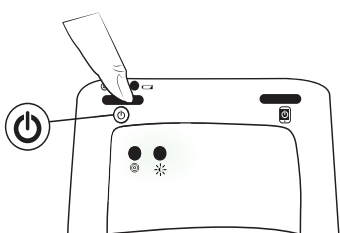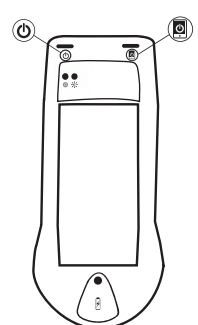

a. Slå enheten av ved å trykke på av/på-knappen i 3 sekunder.

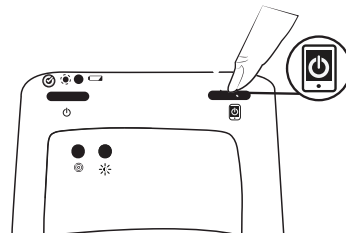

b. Slå skjermen av ved å trykke på av/på-knappen på skjermen i 3 sekunder.



**MolecuLight**