




1. RENGÖRING

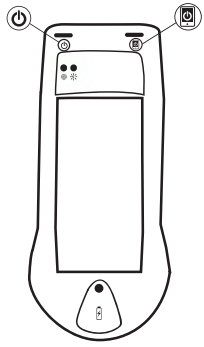


a. Se till att i:X är AV, eller stäng AV enheten och bildskärmen.

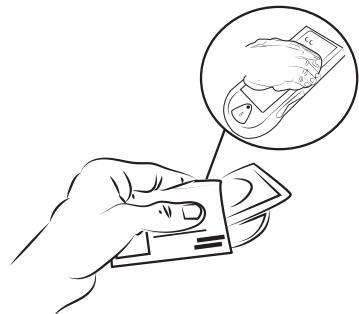


b. Använd en desinfektionsduk för att förrengöra iX.

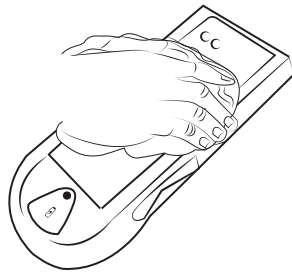

c. Använd en annan desinfektionsduk för att rengöra hela enheten, inklusive alla springor.

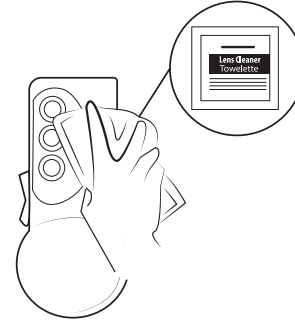

d. Använd en våtservett för att rengöra linser för att rengöra alla glasstyr.

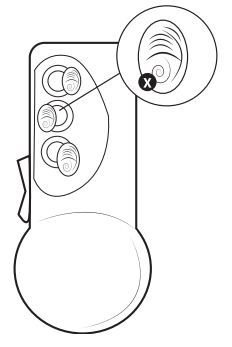


e. Kontrollera att alla fönster är rena och helt fria från smuts och fingeravtryck.


2. LADDNING




a. Ladda enheten och bildskärmen med MolecuLight nätkabel.

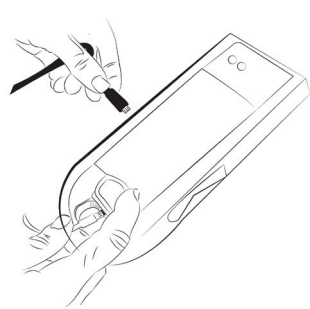


b. Ena änden av nätkabeln ska anslutas till enheten och den andra till bildskärmen.

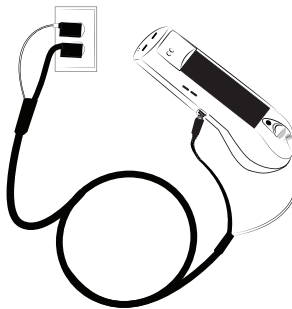

c. Båda laddningsändarna ska anslutas till vägguttaget.

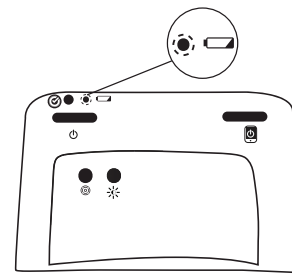


d. Lampan blinkar medan enheten laddas.

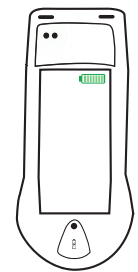


e. Batteriikonen visas medan bildskärmen laddas.


3. PÅSLAGNING

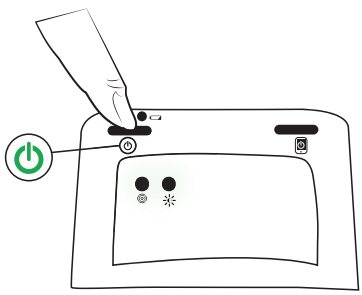


a. Håll strömbrytaren intryckt (i 3 sek) för att slå på enheten.

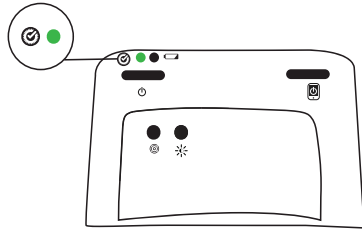


b. Kontrollera att systemets statuslampa lyser grönt (se användarhandboken om den lyser gult eller rött).

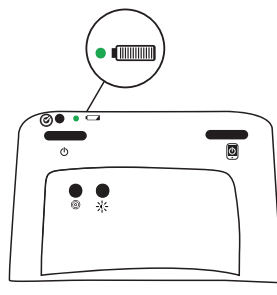

c. Verifiera enhetens batteristatus (grönt betyder maximal laddningskapacitet).

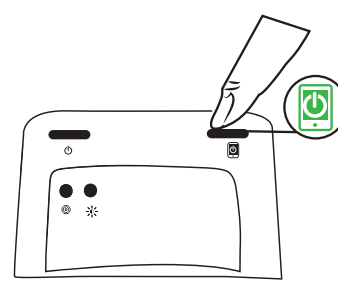


d. Håll bildskärmens strömbrytare intryckt (i 3 sek) för att slå på bildskärmen.

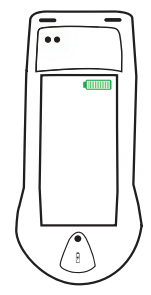


e. Verifiera bildskärmens batterikapacitet.


4. TA EN STANDARDLJUSBILD/VIDEO

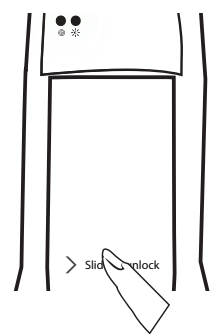


a. Tryck på knappen HEM och välj skjutreglaget.

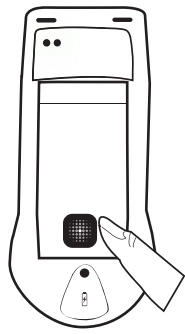

b. Välj iX Camera-appen på bildskärmen.

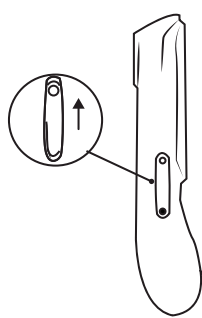


c. Placera brytaren i det övre läget.

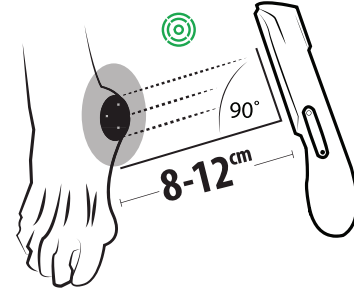

d. Använd områdesfinnarsensorns lampa för att hitta lämpligt avstånd (lampan lyser grönt).




e. Peka på skärmen för att förbättra fokus efter behov.

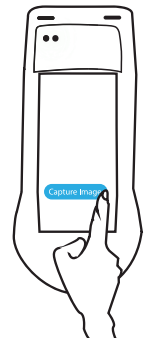


f. Ta bilden och/eller videon. Områdesfinnarsensorns lampa ska förbli grön.


5. TA EN FLUORESCENSLJUSBILD/VIDEO

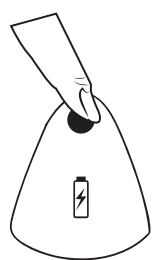


a. Använd knappen Hem för att komma till skärmen, och välj skjutreglaget om det behövs.

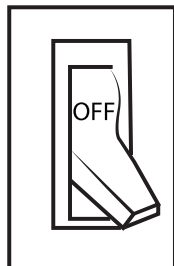


b. Släck belysningen i rummet.

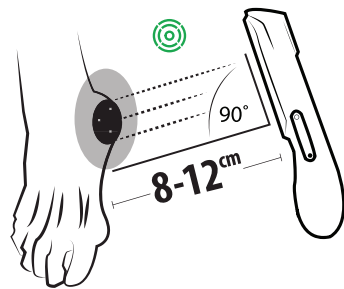


c. Använd områdesfinnarsensorns lampa för att hitta lämpligt avstånd (lampan lyser grönt).

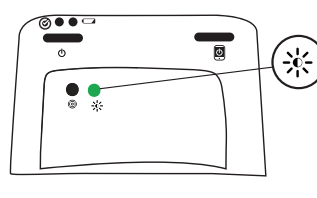


d. Kontrollera att omgivningsljussensorns lampa lyser grön innan du ställer brytaren i FL-läget.

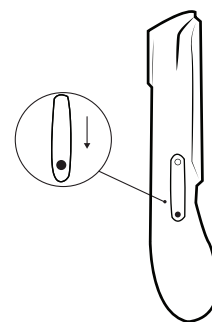

e. Växla till FL-läge. Omgivningsljussensorns lampa slocknar när FL-läget aktiveras.


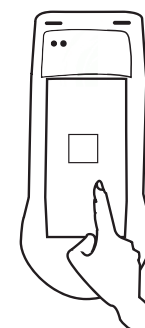


f. Peka på skärmen för att förbättra fokus om det behövs.

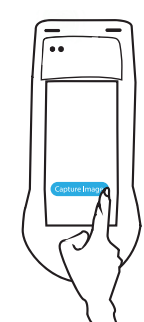


g. Ta bilden och/eller videon. Områdesfinnarsensorns lampa ska förbli grön.

6. AVSTÄNGNING

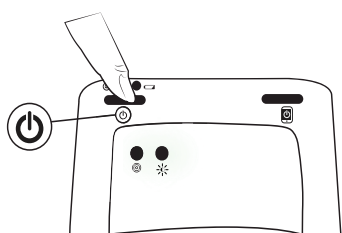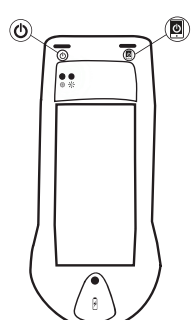

a. Stäng av enheten genom att hålla dess strömbrytare intryckt i 3 sekunder.

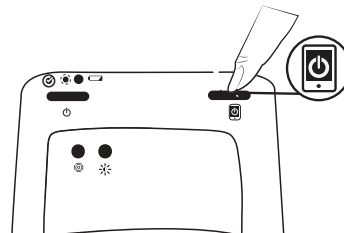

b. Stäng av bildskärmen genom att hålla dess strömbrytare intryckt i 3 sekunder.



MolecuLight